

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MASQUE BARRIERE

I. Informations d'utilisation :

Si vous utilisez le masque correctement, vous réduisez considérablement le risque et la probabilité de contracter des virus et des infections indésirables.

Composition: Masque facial à trois couches composé d'une couche de tissu non tissé de 45 g/m², d'une couche de tissu filtrant non tissé de 25 g/m² et d'une couche de tissu non tissé de 25 g/m².

Laver le masque à 60 °C avec une lessive ordinaire ou un détergent sans agents de blanchiment pendant 30 minutes. Sécher avec un sèche-cheveux. Le produit conserve son efficacité jusqu'à 15 cycles de lavage.

II. Utilisation :

Appliquer le masque sur le visage en le tenant fermement par les élastiques. Le masque doit couvrir le nez, le menton et la bouche. Respecter le sens de pose (plis plongeants vers le bas sur sur la face avant). Après avoir attaché le masques aux oreilles, pincer au niveau du nez pour augmenter l'étanchéité et limiter la fuite.

Attention: Changez le masque toutes les 4 heures.

Vérifiez l'état du masque avant chaque utilisation.

N'utilisez pas de masques endommagés, déchirés, décousus ou altérés.

III. Conservation:

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé à une température comprise entre + 5 °C et 35 °C à l'abri de la lumière du soleil. Tenir éloigner des substances corrosives et de leurs vapeurs, et des rongeurs.
Emballage : 20 pcs. dans un sac en plastique.

IV. Date d'expiration:

Stockage adapté: jusqu'à 4 ans; En cours d'utilisation - jusqu'à l'usure.

V. Avantages du masque:

Le masque est fabriqué à partir de matériaux certifiés pour votre sécurité.

Le masque est réutilisable, lavable selon les instructions. Afin de ne pas endommager la membrane du filtre lors du lavage, il n'est pas recommandé de frotter le masque. Il est fortement déconseillé d'utiliser un sèche-linge.

Désinfection possible à la vapeur.

